

Czyszczenie i dezynfekcja przyłbicy

Ważne jest zapewnienie sobie odpowiednich zabezpieczeń przed przystąpieniem do czyszczenia. Noś rękawiczki, maseczkę ochronną oraz, jeśli to możliwe, przyłbicę. Ze względów bezpieczeństwa traktuj każdą przyłbicę jako skażoną na każdej powierzchni i podejmij odpowiednie środki!

Jeśli przyłbica została skażona bezpośrednio aerozolem (np. przez kasznięcie), a Ty masz inną do dyspozycji, rozważ wyrzucenie tej zanieczyszczonej do odpadów niebezpiecznych.

Jeśli jest to Twoja jedyna przyłbica, przeprowadź proces dezynfekcji:

Przygotuj miejsce, w którym będziesz czyścić przyłbicę. Zdezynfekuj odpowiednio powierzchnię blatu przed przystąpieniem do czyszczenia.

Dla prawidłowego wyczyszczenia przyłbicy, zalecamy jej demontaż.

- ✓ Przetrzyj przyłbicę chusteczką Sani Cloth 70 lub Velox Wipes alkoholowe możesz również użyć preparatu Velox Top AF i spryskać dokładnie wszystkie części przyłbicy co najmniej dwukrotnie.
- ✓ Odczekaj 30 sekund
- ✓ Umyj dokładnie przyłbicę pod bieżącą wodą z użyciem mydła Seraman foam
- ✓ Pozostaw do wysuszenia. (zalecane wytarcie ręcznikiem papierowym, wycieraj zawsze w jednym kierunku)

Wysoce zalecane jest zanurzenie wszystkich elementów przyłbicy w cieczy dezynfekującej - w ten sposób zapewnisz jej pokrycie 100% powierzchni.